



Sistema di raccolta SALIVETTE®

Togliere il tappo (tirare, non svitare) ed estrarre il tampone **SENZA RIMUOVERE** l'alloggiamento interno dove è contenuto



1. Mettere il tampone in bocca e masticarlo delicatamente per un paio di minuti



2. Rimettere il tampone nel suo alloggiamento e richiudere il tappo



3. Conservare in frigorifero fino alla consegna in Laboratorio; il campione si può conservare fino ad un massimo di 3 giorni.
4. Riportare sull'etichetta nome, cognome, data e orario della raccolta:
 - se il medico ha richiesto la determinazione del Cortisolo MATTINO raccogliere la saliva al momento della sveglia
 - se ha richiesto la determinazione del Cortisolo POMERIGGIO/SERA raccogliere la saliva al momento di andare a letto la sera

RACCOMANDAZIONI:

- per almeno 2 ore prima della raccolta **NON bere, mangiare, fumare né fare uso di gomma da masticare**
- eseguire la raccolta prima di lavarsi i denti o almeno un'ora dopo
- evitare l'uso di prodotti cosmetici per le labbra
- il giorno della raccolta evitare il consumo di liquirizia

ATTENZIONE: prodotto non indicato per bambini al di sotto dei 3 anni o pazienti a rischio di deglutire la Salivette.